


**BLINCON KOSMETIK KANTA LEKAP**  
**ARAHAN-ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN**

Nama	Jenis	Dia. (mm)	Kelengkungan (mm)	Diopter (D)
Blincon	Kosmetik Pakai Buang Kanta Lepak	14.0 ~ 15.0	8.5 ~ 8.8	-25.00 ~ 0.00

**Petunjuk untuk Kegunaan**

Blincon Kosmetik Kanta Lepak adalah untuk pembetulan visual orang-orang yang aphakic dan aphakic dengan-berpenyakit mata dengan myopia. Ia juga bertujuan untuk kecantikan.

**Cadangan Jadual Penggantian untuk Pakai Harian**

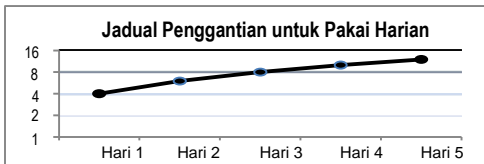

1. Kanta Lepak ini adalah untuk pakai harian.
2. Kanta Lepak anda dibuang and ditukar setiap bulan.
3. Sentiasa tukar kanta lekap yang dipakai mengikut jadual penggantian kerap yang disarankan oleh pengamal penjagaan mata anda.
4. Jangan memakai kanta lekap anda melebihi tempoh yang disyorkan oleh pengamal penjagaan mata anda.


**Sebelum Dipakaikan**

Untuk mengelakkan jangkitan, sila mengikut langkah-langkah seperti berikut:

- Semakkan tarikh luput kanta lekap tersebut sebelum membeli.
- Jangan gunakan jika pakej steril dibuka atau rosak.
- Guna larutan serbaguna pencuci yang dicadangkan untuk mencuci kanta lekap anda.

**Cara-cara Memakai Kanta Lepak**

1. Basuh tangan sehingga bersih dengan sabun dan keringkan dengan tuala kering yang bersih. Bilas kanta lekap dengan larutan khas pencuci.
2. Letak kanta lekap diatas jari telunjuk anda, pastikan ianya dalam bentuk mengukuk dan memastikan ianya dalam bahagian yang betul.

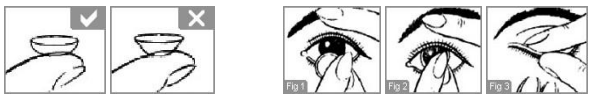

3. Tarik kelopak mata keatas dengan jari sebelah tangan (Rajah 1).
4. Tarik kelopak bawah mata anda dengan jari tengah tangan yang memegang kanta lekap, meletakkan kanta lekap atas kornea anda dengan berhati-hati (Rajah 2).
5. Lepaskan kelopak mata atas anda dan tutup kelopak mata anda dengan perlahan-lahan. Ulangi cara-cara 1-4 pada mata sebelah (Rajah 3).

**Mengeluarkan Kanta Lepak**

1. Basuh tangan sehingga bersih dengan sabun dan keringkan dengan tuala kering yang bersih.
2. Semak kedudukan kanta pada kornea.
3. Tarik kelopak bawah anda dengan jari tangan tengah
4. Menggunakan jari telunjuk untuk menggerak kanta lekap kebahagian bawah mata.

5. Pinch tepi kanta lekap dengan jari telunjuk dan ibu jari untuk mengeluarkan kanta.
6. Ulangi langkah 1-5 pada mata sebelah.

**Pembersihan Harian dan Regimen Penjagaan**

1. Selepas menanggalkan kanta lekap dari mata, letakkan kanta lekap di tapak tangan anda dan gunakan beberapa titik larutan serbaguna pencuci untuk mencuci kanta lekap anda.
2. Gosok kanta lekap perlahan-lahan dengan jari telunjuk sekira-kira 20 saat pada kedua-dua belah.
3. Basuh kanta lekap anda dengan larutan serbaguna pencuci.
4. Rendam kanta lekap dalam penyimpanan dengan larutan serbaguna pencuci.
5. Jangan bilas kanta lekap dengan air paip.

**Kontraindikasi / Amaran / Langkah Berjaga-jaga**

1. Jangan gunakan kanta lekap jika wujud keadaan seperti berikut:
  - a) Penyakit mata, kecederaan atau keabnormalan yang membabitkan kornea, conjunctiva, atau kelopak mata.
  - b) Sebarang jangkitan kornea (bakteria, kulat, protozoal atau virus)) Mata merah atau tidak selesa.
2. Keselamatan penggunaan and penjagaan kanta lekap, larutan serbaguna pencuci dan penyimpanan kanta lekap yang betul adalah amat penting.
3. Jika anda mengalami ketidakselesaan mata, air mata berlebihan, blur visi, kemerahan mata atau masalah lain, anda perlu keluarkan kanta lekap anda dengan serta-merta dan hubungi pengamal penjagaan mata anda.
4. Sentiasa pastikan kanta lekap anda rendam dalam larutan serbaguna pencuci yang disyorkan semasa kanta lekap tidak dipakai. Tempoh pengeringan akan mengurangkan keupayaan permukaan kanta untuk kembali kepada keadaan lembap.
5. Rujuk pengamal penjagaan mata anda tentang pemakai kanta lekap semasa aktiviti sukan.
6. Pakai kanta lekap sebelum bersolek. Jangan biarkan kosmetik, losyen, sabun, krim, deodoran atau semburan ke mata atau kanta lekap.
7. Jangan kongsi kanta lekap anda dengan orang lain.

**Simbol**

	Tarikh pengeluaran		Wap Disterilkan
	Nombor lot		Pengeluar
	Digunakan sebelum		Wakil EU
	Nombor katalog		Rujukkan untuk penggunaan

**Pengeluar:**

**Dreamcon Co., Ltd**

10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea.  
Tel: +82 (55) 381-0300 Fax: +82 (55) 366-0211

**Pemilik Produk:**

**One O One Vision Creations Sdn. Bhd. (830877-A)**

2nd Floor, Sublot 11, Survey Lot 1529, Block 17,  
Jalan Lapangan Terbang, 93250Kuching Sarawak Malaysia.  
Tel: +6 082-383 101 Fax: +6 082-383 102